






Spécimen	Moyen de transport	N° d'article
URINES <ul style="list-style-type: none">Ne pas recueillir la première urine du matin, ni une collection de plusieurs urinesRécolter la totalité d'une miction	→ Flacon de 500 mL contenant 30 mL de CytoLyt® Solution	 612419
LAVAGE DE VESSIE	→ Flacon de 500 mL contenant 30 mL de CytoLyt® Solution	
ÉPANCHEMENTS : PLEURAL, PERITONEAL, PERICARDIQUE, ASCITE <ul style="list-style-type: none">Mettre le prélèvement le plus rapidement possible dans l'anticoagulantNe jamais mettre ces spécimens dans du CytoLyt® Solution	→ Flacons de différents volumes avec anticoagulant	 50 ml : 11098 100 ml : 10140 250 ml : 10139 500 ml : 10138
LCR <ul style="list-style-type: none">Faire parvenir le prélèvement au laboratoire le plus rapidement possible	→ Tube à LCR	 600012
EXPECTORATIONS <ul style="list-style-type: none">Les expectorations sont préférables le matin à jeunRincer la bouche avec de l'eau, tousser profondément et expectorerEnvoyer un spécimen à 3 reprises	→ Flacon de 50 mL	 604066
ASPIRATIONS, SECRETIONS, LAVAGES BRONCHIQUES	→ Flacon de 50 mL	
BROSSAGES BRONCHIQUES	→ Tube de 50 mL avec 30 mL de CytoLyt® Solution	
PONCTIONS A L'AIGUILLE FINE (SEIN, FOIE, THYROÏDE, GLANDE SALIVAIRE, ...)	→ Tube de 50 mL avec 30 mL de CytoLyt® Solution	 603179
ÉCOULEMENT MAMELONNAIRE	→ Tube de 50 mL avec 30 mL de CytoLyt® Solution	