



Welches Material f ˆur welche Probe ?

Proben (Pleuraerguss, Perikarderguss, Aszites)

1/1

Hematologie

Monovette® EDTA KE, 2.6 mL (violett) (Bestellnr. 675307)

- Zellzahlung.



Bestellnr.
675307

Chemie

Monovette® HEPARINE ISO, 4.9 mL (gr ˆun) (Bestellnr. 675316)

- **Pleuraerguss:** Albumin, LDH, Na, Amylase, Triglyzeride, Glukose, K, Proteine.
- **Aszitesfl ˆussigkeit:** Albumin, Cholesterin, LDH, Na, Amylase, Triglyzeride, Bilirubin, Glukose, K, Proteine.
- **Andere:** Albumin, Cholesterin, LDH, Na, Amylase, Kreatinin, Triglyzeride, Bilirubin, Glukose, K, Harnsaure, Chlorid, Proteine



Bestellnr.
675316

Bakteriologie und Molekularbiologie

Steriler trockener Behalter (leer), 60 mL (Bestellnr. 638259)

- Nachweis von Erregern, welche f ˆur ein Infektionsgeschehen verantwortlich sind.
- Routine-Bakteriologie
- Nachweis von anaeroben Keimen
- Viren, nicht kultivierbare Bakterien: PCR
- Mykobakterien: Kultur, PCR



638259

Bestellnr.

Zytologie

Behalter mit Antikoagulans, 50 mL (davon 10 mL Antikoagulans) (Bestellnr. 11098)

Behalter mit Antikoagulans, 100 mL (davon 20 mL Antikoagulans) (Bestellnr. 10140)

Behalter mit Antikoagulans, 250 mL (davon 50 mL Antikoagulans) (Bestellnr. 10139)

Behalter mit Antikoagulans, 500 mL (davon 100 mL Antikoagulans) (Bestellnr. 10138)

- Nachweis von Entz ˆundungs- und Tumorkrankheiten
- Die Probe umgehend in das Antikoagulans geben
- Das gesamte Probematerial ins Labor schicken.
- Im K ˆuhlschrank aufbewahren, falls der Kurier spater als seine halbe Stunde nach Probeentnahme eintrifft.



11098 / 10140 /
10139 / 10138

Bestellnr.