

Quel type de matériel pour quel prélèvement ?

# Procédure de prélèvement de salive pour la PCR SARS-CoV-2

## Matériel **BIOCOMMA**

À disposition au Magasin central de l'ICH, magasin.sion@hopitalvs.ch

- Kit de prélèvement salivaire (N° Opale 674558)



## Marche à suivre pour la récolte

### IMPORTANT :

Dans l'heure précédant le prélèvement, éviter de manger, boire, fumer ou mâcher du chewing-gum.

- 1) Étiqueter le grand tube avec l'entonnoir en mentionnant le nom, prénom et date de naissance du patient. Il n'est pas nécessaire d'identifier le petit tube à bouchon bleu.
- 2) Demander à la personne dépistée de s'éclaircir la gorge et de cracher dans le grand tube avec l'entonnoir **jusqu'à ce que le niveau de la salive atteigne** la ligne bleue.
- 3) Transférer le milieu liquide **rose** (petit tube à bouchon bleu) dans le grand tube avec l'entonnoir. **Ne pas jeter le bouchon bleu.**
- 4) Dévisser l'entonnoir ayant servi au prélèvement et le jeter.
- 5) Utiliser le bouchon bleu (du petit tube) et le visser sur le grand tube.
- 6) Retourner 2-3 fois le tube pour mélanger l'échantillon avec le milieu.
- 7) Transmettre le tube au laboratoire. Le petit tube et l'entonnoir peuvent être jetés.

